

BACT GRAM NEG/POS

10 stk med pipetter og mælkeprøverør



BACT GRAM NEG/POS INDEHOLDER

- 10 stk. BACT Gram neg/pos
- 10 stk. engangspipetter
- 10 stk. mælkeprøverør

Kræver at du har

- Mini-inkubator, varenummer 301

BACT Gram neg/pos kan identificere, om der er bakterievækst eller ej i en mælkeprøve fra malkekvæg samt skelne mellem Gram-negative og Gram-positive bakterier.

BACT er en brugervenlig engangs-testbrik baseret på mikrofluidteknologi samt anvendelsen af reagenser. Der anbringes en dråbe mælk i en åbning på testbrikken, hvorefter den placeres i mini-inkubatoren. Pipetten har overløbsfunktion, der sikrer, at kun det nødvendige volumen appliceres. Mini-inkubatoren sørger for at styre konditionerne omkring testbrikken, og en opformering af de tilstedeværende bakterier i mælkeprøven vil finde sted.

Efter 16 timer vil farveindikation i resultatfelterne på BACT angive 'INGEN VÆKST', eller 'GRAM NEG', eller 'GRAM POS'. Ved nogle bakterietyper eller ved høj koncentration af bakterier kan farveskifte indtræde før de 16 timer.



BACT GRAM NEG/POS

10 stk med pipetter og mælkeprøverør

ANVENDELSE

Udtagning af mælkeprøve



Applikation af mælkeprøve




Mini-inkubator



Mini-inkubator
ikke inkluderet

Aflæsning

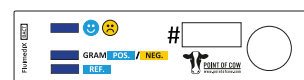

INGEN VÆKST



GRAM-POSITIV



GRAM-NEGATIV

PRODUKT FORDELE

- Støtteværktøj ved tilvalg/fravalg af behandling af mild yverbetændelse
- Opfølgning på om behandling har effekt
- Nem at anvende, ingen træning nødvendig
- Hurtigt svar - inden for 16 timer

SPECIFIKATIONER

Varenummer: 201,

BACT gram neg/pos, 10 stk.

BACT Gram neg/pos	Engangs-pipette	Mælkeprøverør
10 stk	10 stk	10 stk
Engangsenhed i plast	Engangsenhed i plast	Engangsenhed i plast
Med hul til applicering af mælk samt 3 aflæsningsfelter	Med overløbsfunktion, der sikrer, at kun den nødvendige volumen af mælk dispensereres	Kan rumme 5mL mælk
Holdbarhed: 3 måneder fra produktionsdato		
Materiale: Polystyren	Materiale: Polyethylen	Materiale: Polypropylen